



华力争（天津）电子科技有限公司

型号：HLZ-54

电子轮椅秤 电子体重秤 医用体检秤 体重测量仪

产品概述：

电子轮椅秤是专门为医疗行业量身定做的产品，采用现代简洁外观设计，供身体有障碍人士

使用，具透析功能，LCD/LED 显

示交直流两用，采上等不锈钢材

质制作，提升医院单位的档次，

明亮的 LED 显示

使显示直观清晰明亮,带上下斜

坡，方便轮椅上下，使你称量更

方便。

技术参数：

最大称量：200kg

最小分度值：100g

净 重：56.9kg

毛 重：83.4kg


等 级：III 级

显 示：6 位 LCD/LED，6 个状态指示

使用电源：免维护铅酸蓄电池 DC6V/4AH

使用温度：0-40°C

储运温度：-25-55°C

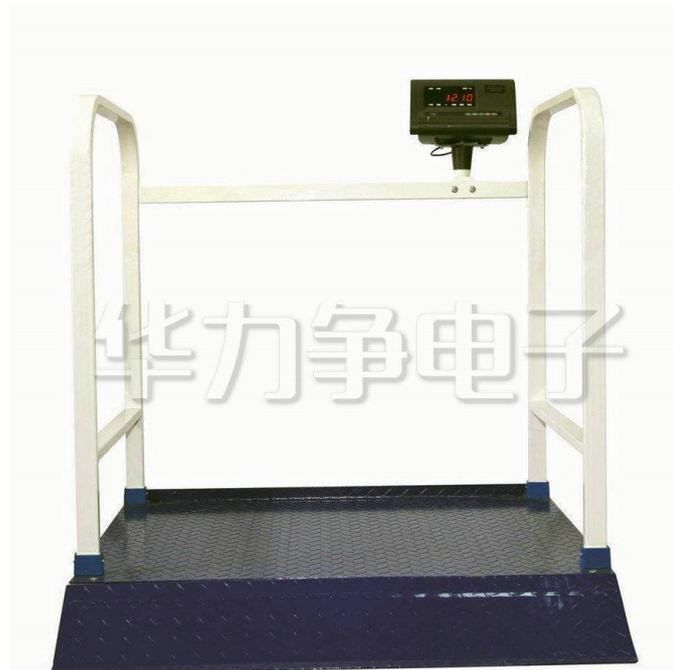

手机 18920835289

022-28560400

www.hualizheng.com



华力争（天津）电子科技有限公司

湿度： $\leq 85\%RH$

最大称量：200kg

最小分度值：100g

通讯接口（可选）：RS232C；波特率 1200/2400/4800/9600 可选

大屏幕显示接口（可选）：采用串行输出方式：电流环信号，传输距离 ≤ 50 米

操作功能键：

【功能】：在称重状态下，按此键大于 5 秒，进入用户设置模式。按此键小于 5 秒，进入计数状态。

【*】：在计数状态时，按此键进入取样样本数输入状态。

【去皮】：在称重状态时，按此键去除皮重。

【置零】：在称重状态下，按此键重量显示为零。

【#】：标定时用。

【开/关】：在关机状态时，按此键开机，在关机状态下，按此键关机。

产品安装：

1、开箱后，将秤置于平整地面上，调整四个支脚，直至秤台水平平稳，否则会直接影响秤的称量。

2、用 8 只 M3.2X20 的自攻螺钉把左右两边的立柱结合件与秤台结合件联结拧紧（注：先把秤右上角的电缆线两端的卡口联结）；再用 4 只 M5X15 的螺钉把带有仪表的横杆结合件和左右两边的立柱结合件联结

拧紧，并调整仪表角度；最后用 6 只 M6X20 的螺钉把斜坡板与秤台联结拧紧即可。



华力争（天津）电子科技有限公司

3、接通电源，打开仪表后侧的船型开机开关，电子轮椅秤进入自检状态二秒钟，稳定后显示零，即进入称重状态。

注意事项：

- 1、▲！禁止在秤台上蹦跳，以免损坏传感器。
- 2、轮椅秤的清洁，应采用柔软的干湿布轻轻擦显示屏及秤体。禁止用带有腐蚀性的溶液及水擦洗；以免损坏秤的外表和造成显示仪表线路短路。
- 3、当仪表显示“bAttlo”时则表示体重秤蓄电池电量不足，应插上交流电源进行充电；若长时间不使用电子体重秤，应关闭开机开关，防止电池过量放电，导致报废。
- 4、一次充电在8小时左右为宜。打开开机开关也能充电，但电池未充足时，有可能引起秤的显示不稳定。充足电后大约可使用100小时；电池充满电后，应将充电器拔开，防止损坏电池。
- 5、轮椅秤应储存在通风、干燥、无腐蚀性气体且环境温湿度为-10℃~+40℃；≤70%RH无结露的库房内。

装箱清单：

- 电子轮椅秤秤台1 台
- 显示仪表1 只
- ∩型扶手支架2 把
- 扶手支架横杆1 把
- 斜坡板1 块
- 13.2MX20 自攻螺丝8 只
- 5MX15 元机螺丝.....4 只



华力争（天津）电子科技有限公司

6MX20 元机螺丝.....6 只
6MX35 元机螺丝.....1 只
合格证1 份
装箱单1 份
保修卡1 份
使用说明书1 份