



# 华力争（天津）电子科技有限公司

型号：HLZ-16

## 电子儿童称/身高坐高体重计/座椅儿童秤

产品概述：

身高坐高体重计是交直流两用的特种电子衡器，产品采用了高性能八位单片机和高精度传感器技术，由于八位单片机运行程序中有零位自动跟踪、自动标定、抗干扰及振动识别等程序软件，因此，身高

坐高体重计具有精度高，数字显示稳定，计量

速度快，使用操作方便等特出优点，并配有身高测量器。产品广泛适用于企业、学校、医院、保健站检测儿童体重、身高之用。

技术参数：

最大称量：50kg/100kg

最小分度值：50g/100g

精    度：符合 OIML Ⅲ级秤标准

身高测量器测量范围：60-160cm

身高测量器测量范围：38-100cm

身高测量器最小分度值：0.5cm

显示方式：5 位 0.8 英寸 LED 数码显示，6 个 LED 状态指示，分别为：kg，Lb，累加，去皮，稳定，零位

操作键盘键：采用扁平触摸式，具有防水功能；共五个功能键。





# 华力争（天津）电子科技有限公司

超载报警功能：当超出最大称量时，显示“Err03”并发出报警声。

电源电压：采用交直两用，交流 220V ( +10%--15% ) 50Hz , 10W

直流免维护可充电电池 ( 6V、5Ah )

工作环境：0°C ~ +40°C ≤90% RH 无结露

欠电提示：电池电压低于设定值时，每隔一分钟提示“bAttlo”；

节电模式：重量稳定不变 3 分钟，仪表从左到右提示“.”

## 操作功能键

置零键：当秤台上的重量 $\leq 2\%FS$ ，按[置零]键有效，重量显示为零且零位指示灯亮。

去皮键：当秤台上的重量 $\leq 100\%FS$ ，按[去皮]键有效，去皮指示灯亮且清除皮重。

累加键：加载重物，按累加键，累加指示灯亮，交替显示累加重量和累加次数（加重前必须

先按去皮键使仪表回零），累加次数不超过 99 次，重量不超过 999999；

kg/ Lb：按此键可以选择称量显示单位公斤或磅。

累清键：在设置状态下为确认键，称重状态下用于消除累加的称重数据。

## 装箱清单：

- 1、电子儿童秤.....1 台
- 2、可折叠式儿童小椅子.....1 张
- 3、充电器.....1 个
- 4、合格证.....1 份
- 5、装箱单.....1 份
- 6、使用说明书.....1 份

## 安装步骤：



## 华力争（天津）电子科技有限公司

- 1、开箱后，将秤置于平整地面上，调整四个支脚，直至秤平稳，否则会影响秤的称量。
- 2、用 3 只 M6×15 的 “+” 螺钉把仪表及立柱组合件与秤台组合件联接拧紧;并调整好仪表角度，拧紧止定螺丝。
- 3、儿童小椅子拼装完成后，四个支架脚固定在承重板上，并调正，拧紧螺丝即可。
- 4、身高测量器按顺时针方向拧紧即可。
- 5、接通电源，打开仪表右侧的船型开机开关，电子体重秤进入自检状态二秒钟，稳定后显示零，即进入称重状态。

### 注意事项：

- 1、禁止在秤台上蹦跳，以免损坏传感器。
- 2、秤的清洁，应采用柔软的干湿布轻轻擦显示屏及秤体。禁止用带有腐蚀性的溶液及水擦洗；以免损坏秤的外表和造成显示仪表线路短路。
- 3、当仪表显示 “bAttlo” 时表示体重秤蓄电池电量不足，应插上交流电源进行充电；若长时间不使用电子体重秤，应关闭开机开关，防止电池过量放电，导致报废。
- 4、一次充电在 8 小时左右为宜。打开开机开关也能充电，但电池未充足时，有可能引起秤的显示不稳定。充足电后大约可使用 100 小时；电池充满电后，应将充电器拔开，防止损坏电池。
- 5、本产品应储存在通风、干燥、无腐蚀性气体且环境温湿度为  $-10\text{ }^{\circ}\text{C} + 40\text{ }^{\circ}\text{C}$  ;  $\leq 70\% \text{RH}$  无结露的库房内。