



## 华力争（天津）电子科技有限公司

### HLZ-53 电子婴儿秤/婴儿体重秤/婴幼儿身高坐高测量仪

产品概述：

婴儿体重秤是最新开发的测量婴幼儿体重和身高（坐高）两用的特种电子衡器；采用了高精度解析传感器（LOAD CELL）和专用微电脑控制，具有公英制转换、自动调整零点、计量精度高、数字显示稳定、计量速度快、可以测量婴儿身高与坐高、使用操作方便等特出优点。



电子婴儿秤广泛适用于医院、妇幼保健站检测婴儿体重、身高之用。

技术参数：

最大称量：20kg

分度值：20g

精度：符合 OIML Ⅲ级秤标准示

显示方式：6 位 LCD 液晶显示

交流电压：220V±10% 50HZ

直流电压：6V 1.2AH/20HR

身高测量范围：0-100cm

分度值：1mm

测量摆幅：≤5mm

侧板位移力：≤10N

手机 18920835289 022-28560400

[www.hualizheng.com](http://www.hualizheng.com)



# 华力争（天津）电子科技有限公司

超载报警功能：当超出最大称量时，显示器“~”报警

工作环境：5°C ~ 40°C，≤90%RH 无结露

外型尺寸：105×53×49 cm

外包装尺寸：112×57×32cm

毛重：20 kg

净重：14kg

电子婴儿秤带柜子量身高

操作键功能：

- 1、置零键：当秤台上的重量 $\leq 2\%FS$ ，按[置零]键有效，重量显示为零且零位指示灯亮。
- 2、去皮键：当秤台上的重量 $\leq 100\%FS$ ，按[去皮]键有效，去皮指示灯亮且清除皮重。
- 3、累加键：加载重物，按累加键，累加指示灯亮，交替显示累加重量和累加次数（加重前必须先按去皮键使仪表回零），累加次数不超过 99 次，重量不超过 999999；
- 4、kg/Lb：按此键可以选择称量显示单位公斤或磅。
- 5、累清键：在设置状态下为确认键，称重状态下用于消除累加的称重数据。

安装及注意事项：

- 1、婴儿体重秤开箱后，将秤置于水平的平面上，调整四个支脚，直至秤平稳，否则会影响秤的称量。
- 2、将秤的立柱和秤台连接并拧紧螺母即可。
- 3、接通电源，打开仪表右侧的船型开机开关，电子体重秤进入自检状态二秒钟，稳定后显示零，即进入称重状态。



## 华力争（天津）电子科技有限公司

4、秤的清洁，应采用柔软的干湿布轻轻擦显示屏及秤体。禁止用带有腐蚀性的溶液及水擦洗。

5、测量板的移动需要用力均匀，否则会影响测量滑板的流畅感。

装箱清单：

电子婴儿秤.....1 台

充电器.....1 个

保修卡.....1 份

装箱单.....1 份

使用说明书.....1 份